



acti-fine®

TRACHEOSTOMY TUBE

ТРУБКА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ

(с манжетой, без манжеты)

tracheostomy tube

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, проведения ингаляционного наркоза, самостоятельного дыхания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь трубку, не нарушая ее стерильность
- произвести тестовое раздувание манжеты трубки с последующим полным сдуванием перед интубацией
- ввести трубку через наложенную ранее трахеостому
- извлечь стилет
- через пилотный баллон раздуть манжету минимальным объемом воздуха с помощью шприца. Манжету следует раздувать до появления небольшого сопротивления в шприце.
- после раздувания манжеты шприц убрать
- закрепить введенную трахеостомическую трубку на шее пациента с помощью гибкого фланца и лент для фиксации
- соединить коннектор трубки с разъемом устройства искусственной вентиляции легких (если необходимо)
- по окончании интубации, из манжеты убрать воздух и извлечь трубку
- обработать и утилизировать трубку в установленном порядке

ВАЖНО:

- следует избегать контакта трубки с хирургическими электродами и лазерными лучами. Такой контакт может привести к перфорации трубки или манжеты, а так же вызвать возгорание трубки с выделением токсических паров
- в случае использования каких либо смазывающих препаратов, убедитесь, что они не попали в просвет трубки, это может привести к нарушению вентиляции
- давление манжеты следует периодически проверять для того чтобы предупредить её спускание или перерастяжение
- спускайте манжету перед перемещением трубки. Манипуляции с раздутой манжетой могут привести к травме пациента или повреждению манжеты и последующей замене трубки. Проверьте положение трубки после каждой манипуляции с ней
- следует проверять трубку после каждого изменения положения тела пациента. Любое смещение трубки должно быть незамедлительно исправлено, так как это может привести к нарушению вентиляции
- после интубации необходим аускультативный контроль вентиляции легких пациента с целью определения правильного расположения трубки и адекватности проводимой респираторной терапии
- используйте оборудование имеющее 15-миллиметровые разъемы, что является стандартом, в соответствии с EN1782. Персонал должен быть готов к анатомическим особенностям верхних дыхательных путей каждого пациента, включая длину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- применяется специально обученным персоналом
- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С в сухом, прохладном месте
- обработка и утилизация трубки в установленном порядке



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента.

Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

"ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (ДЕНР)"




Этот продукт содержит пластификатор (ДЕНР). Медицинские изделия, содержащие фталаты не должны использоваться для беременных женщин, кормящих матерей и детей.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена



 M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: info@schilling-med.de - www.schilling-med.de

20110707